

ISTRUZIONI D'USO PER MASCHERINA MASK 001

DESCRIZIONE	MASCHERINA CHIRURGICA MASK 001
RAGIONE SOCIALE	Mavis srl
SEDE LEGALE	Strada di Oselin 10 - 33047 Remanzacco UD - Italy
NOME PRODOTTO	MASK 001
MATERIALE	tessuto non tessuto SMS in polipropilene - elastico poliestere
NUMERO VELI	2 veli di tessuto tecnico SMS
ETICHETTA	il numero di lotto, la data di produzione e data di scadenza sono stampati sull'etichetta presente sulla confezione
UTILIZZO	monouso
USO	igienizzare le mani lavandole con acqua e sapone - rimuovere la mascherina dalla confezione - indossare la mascherina posizionando gli elastici dietro le orecchie - tirare la mascherina chirurgica dall'alto e dal basso per aprire le pieghe - far aderire il nasello ergonomico plasmandolo sul naso - La mascherina va sostituita quando si inumidisce con il respiro come da indicazioni dell'OMS e in ogni caso eliminata a fine turno di lavoro.
	
CONTENUTO SCATOLA	vedi pezzi indicati su confezione
UNA BREVE DESCRIZIONE	mascherina chirurgica tipo 1 a due veli con elastici e nasello regolabile
DIMENSIONI	175 x 95 mm
MARCHIO	marchio CE dispositivo medico classe 1 direttiva 93/42/CEE
TIPO	dispositivo medico classe I - Registrato con il N° 1956573
DESTINAZIONE D'USO	le maschere di tipo 1 NON sono destinate all'uso da parte di operatori sanitari in sala operatoria o in altre attività mediche con requisiti simili. La mascherina chirurgica di tipo 1 può essere utilizzata solo per i pazienti e per le altre persone per ridurre il rischio di diffusione delle infezioni, in particolare in situazione epidemiche e pandemiche. Se calzata in modo corretto da persone prive di sintomi può ridurre l'emissione di droplets contenenti eventuali virus delle vie respiratorie di chi la indossa. Può essere utilizzata per uso domestico, in particolare negli ambienti chiusi e molto affollati. Può essere destinata anche all'uso professionale diverso da quello sanitario (es. settori food, beverage and beauty, ecc.)
PRECAUZIONE D'USO	non adatto a chi ha difficoltà respiratorie a chi è allergico ai materiali con cui è realizzata
CONFORME ALLE NORME	UNI EN 14683
TIPO	NON STERILE
ORIGINE	Made in Italy
NOTE	Latex free - prodotto senza lattice
CONSERVAZIONE	conservare in ambienti freschi lontano da raggi solari diretti e fiamme libere
SMALTIMENTO	smaltire nei rifiuti secondo le norme locali e nazionali. Non disperdere o abbandonare nell'ambiente
CONFEZIONE	confezione riciclabile